

# OssDsign® Cranial PSI

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το OssDsign Cranial PSI είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν για την ανακατασκευή ατελειών κρανιακών οστών. Το Cranial PSI παρέχεται για μόνιμη εμφύτευση. Το προϊόν αποτελείται από ένα πλέγμα τιτανίου 3D εκτύπωσης, το οποίο καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος του από κεραμικό φωσφορικού ασβεστίου. Το κεραμικό μέρος αποτελεί κατά προσέγγιση ~90% του όγκου του εμφυτεύματος.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

#### Μαγνητική τομογραφία (MRI)

Το OssDsign Cranial PSI είναι ασφαλές για μαγνητική τομογραφία υπό προϋποθέσεις. Εάν πρόκειται να

υποβληθείτε σε μαγνητική τομογραφία, ενημερώστε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ότι διαθέτετε OssDsign Cranial PSI (προσαρμοσμένη ανά ασθενή συσκευή). Λεπτομερείς πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: [www.ossdsign.com/OSSDSIGN\\_Cranial](http://www.ossdsign.com/OSSDSIGN_Cranial)

#### Ακτινοθεραπεία

Το OssDsign Cranial PSI ενδέχεται να επηρεάσει τη δΟΣολογία της ακτινοθεραπείας. Εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε ακτινοθεραπεία, ενημερώστε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ότι διαθέτετε OssDsign Cranial PSI (προσαρμοσμένη ανά ασθενή συσκευή).



Διαβάστε πάντα τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν για να ενημερωθείτε για τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.