

OssDsign® Cranial PSI

INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE

INFORMAZIONE GENERALE

OssDsign Cranial PSI è un dispositivo medico per la ricostruzione dei difetti delle ossa craniche. Cranial PSI è concepito come impianto permanente. Il dispositivo è costituito da una mesh in titanio realizzata mediante stampa 3D, coperta in larga misura da una ceramica a base di fosfati di calcio. La parte in ceramica costituisce circa il 90% del volume dell'impianto.

PRECAUZIONI

Risonanza magnetica per immagini (RMI)

OssDsign Cranial PSI è a compatibilità RMI condizionata. Se ci si dovesse sottoporre a risonanza magnetica per immagini,

informare il fornitore del servizio sanitario della presenza dell'impianto OssDsign Cranial PSI (impianto su misura per il paziente). Informazioni dettagliate sono disponibili su: www.ossdsign.com/OSSDSIGN_Cranial

Radioterapia

OssDsign Cranial PSI potrebbe influire sul dosaggio della radioterapia. Se ci si dovesse sottoporre a radioterapia, informare il fornitore del servizio sanitario della presenza dell'impianto OssDsign Cranial PSI (impianto su misura per il paziente).



Leggere sempre le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto per informazioni su indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni.